



Påsetting av småfemerket Combi E23 / Combi 3000 Mini eller Små

Høyre øre

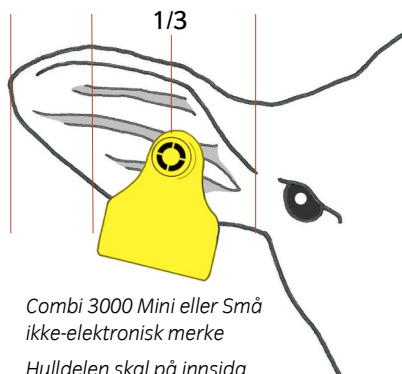

Combi 3000 Mini eller Små
ikke-elektronisk merke
Hulldelen skal på innsida
av øret.

Venstre øre

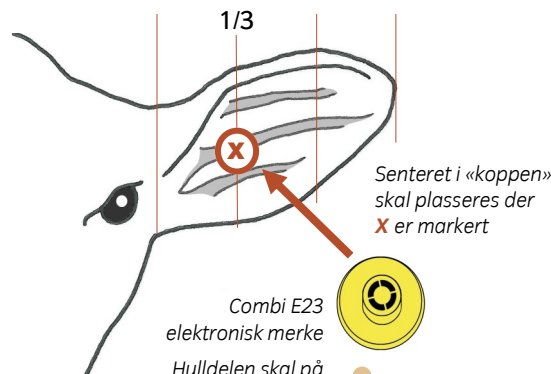

Combi E23
elektronisk merke
Hulldelen skal på
innsida av øret.

Bruk tanga Combi Junior

Combi Junior brukes både til de ikke-elektroniske og de elektroniske øremerkene.

NB: Ta ut plastinnsatsen i tanga.



1. Merket må settes i øret med **ett** fast trykk med tanga. Det sikrer et rent, godt hull og er til mindre ubehag for dyret.
2. Merket må settes **mellom de to nederste bruskenes** i øret og en tredjedel ut på øret fra ørefestet og hodet.
3. Etter at merket er satt i, **vri merkedelene litt rundt** i forhold til hverandre, for å gjøre rent sårhullet.



Det elektroniske øremerket Combi E23 (hulldel) er festet på sin respektive tappdel. Hulldelen og tappdelen rives løs fra hverandre og er klare for isetting.

Pass på å ikke blande merkedelene; hull- og tappdel **må** ha samme nummerering.

Desember 2022